

# Mode d'emploi combiné INSTI® MULTIPLEX – INSTI® VHC



## ETAPE 1



Désinfecter le doigt du patient



Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



Former une grosse goutte de sang suspendue



Recueillir la goutte de sang avec la **pipette INSTI® Multiplex** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir




Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le **flacon 1 Multiplex**



Refermer le **flacon 1 Multiplex** et l'homogénéiser par des inversions


## ETAPE 2

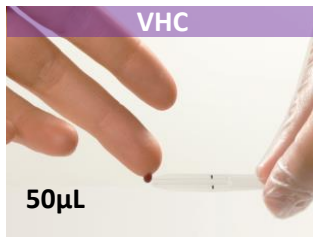

Recueillir la goutte de sang avec la **pipette INSTI® VHC** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le **flacon 1 VHC**

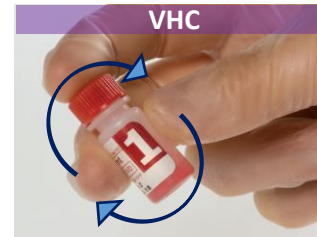

Refermer le **flacon 1 VHC** et l'homogénéiser par des inversions



Vider le contenu du **flacon 1 VHC** dans la **cupule VHC** et attendre que le liquide ait traversé la membrane



**Homogénéiser par inversion le flacon 2** puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Répéter l'opération précédente pour le flacon 3 et lire le **résultat du test VHC immédiatement**

## ETAPE 3



Vider le contenu du **flacon 1 Multiplex** dans la **cupule Multiplex** et attendre que le liquide ait traversé la membrane



**Homogénéiser par inversion le flacon 2** puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Répéter l'opération précédente pour le flacon 3 et lire le **résultat du test Multiplex immédiatement**

**Interprétation  
des résultats  
au verso**

## INTERPRETATION DES RESULTATS

### VIH/syphilis



VIH	Syphilis
-	-



VIH	Syphilis
+	-



VIH	Syphilis
-	+



VIH	Syphilis
+	+

### VHC



VHC
-



VHC
+

1 piqûre  
3 résultats