

TROD* TOYO

HBsAg / anti-HBs

Conseils pour le prélèvement de sang
au bout du doigt


Bras tendu tout le long
du corps (position déclive),
main au niveau de la taille

Prélèvement facilité
par le lavage préalable
des mains à l'eau chaude

Comment utiliser la pipette de prélèvement ?

LA PIPETTE S'UTILISE DE LA MÊME FAÇON
QUE LES PIPETTES INSTI® VIH ET TOYO VHC

1. **MAINTENIR LA PIPETTE HORIZONTALE**
et mettre en contact avec le sang.
NE PAS APPUYER SUR LA POIRE DE LA PIPETTE
2. Prélever du sang jusqu'au trait noir situé
au milieu du réservoir de la pipette
3. Pour vider le sang dans la zone de dépôt
de la cassette, appuyer sur la poire de la pipette

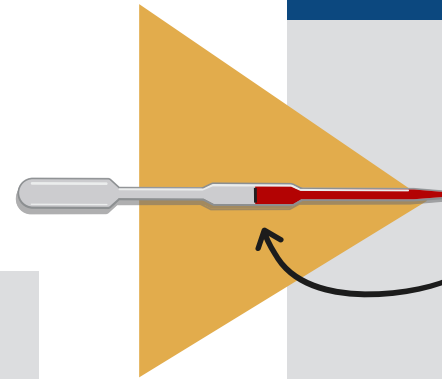

Prélèvement



1 Identifier le test TOYO HBsAg
ou anti-HBs puis désinfecter
le doigt (en évitant la pince)



2 Piquer le doigt propre avec
l'autopiqueur fourni



3 Former une grosse goutte de
sang suspendue



4 Recueillir la goutte de sang
suspendue en approchant la
pipette **horizontalement** de la
goutte (ne pas appuyer sur la
poire de la pipette)



5 Répéter les opérations 3 et
4 jusqu'à ce que le sang ait
atteint le trait noir de la pipette

Réalisation du test



1 Presser la poire de la pipette
pour **vider le sang** dans la
zone de dépôt



2 lire après **15 MIN**
(ne pas lire après 20 minutes)

Laboratoires N E P H R O T E K
F a i r e P l u s P o u r L a S a n t é

43, rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tél. : 01 46 00 40 40 - Fax : 01 46 00 40 41

www.nephrotek.fr