

**Bras tendu tout le long  
du corps (position décline),  
main au niveau de la taille**

## HBsAg / anti-HBs

Conseils pour le prélèvement de sang  
au bout du doigt

**Prélèvement facilité  
par le lavage préalable  
des mains à l'eau chaude**

### Prélèvement



**1** Identifier le test TOYO HBsAg ou anti-HBs puis désinfecter le doigt (en évitant la pince)



**2** Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



**3** Former une grosse goutte de sang suspendue



**4** Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette **horizontalement** de la goutte (ne pas appuyer sur la poire de la pipette)



**5** Répéter les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

### Réalisation du test



**1** Presser la poire de la pipette pour **vider le sang** dans la zone de dépôt



**2** Délivrer **une goutte** de diluant dans la zone de dépôt



**3** lire après **15 MIN**  
(ne pas lire après 20 minutes)

  
Laboratoires **NEPHROTEK**  
Faire Plus Pour La Santé

43, rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt - France  
Tél. : 01 46 00 40 40 - Fax : 01 46 00 40 41

[www.nephrotek.fr](http://www.nephrotek.fr)