

Phase 1 PRÉLÈVEMENT



Désinfecter le doigt du patient



Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



Former une grosse goutte de sang suspendue



50µL

Recueillir la goutte de sang avec la **pipette INSTI®** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1



Recueillir la goutte de sang avec la **pipette INTEC®** tenue **horizontalement**.

Phase 2 RÉALISATION DES TESTS



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt



Délivrer **deux gouttes de diluant** dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



Refermer le flacon 1 et l'homogénéiser par des inversions



Vider le contenu du flacon 2 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Homogénéiser par inversion le flacon 2 puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Répéter l'opération précédente pour le flacon 3 et lire le résultat du test **immédiatement**

INTERPRÉTATION



VIH	Syphilis
-	-



VIH	Syphilis
+	-



VIH	Syphilis
-	+



VIH	Syphilis
+	+



VHC
-



VHC
+

**1 piqûre
3 résultats**