

Phase **1** PRÉLÈVEMENT



Désinfecter le doigt du patient



Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



Former une grosse goutte de sang suspendue




50µL

Recueillir la goutte de sang avec la **pipette INSTI[®]** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir




Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1

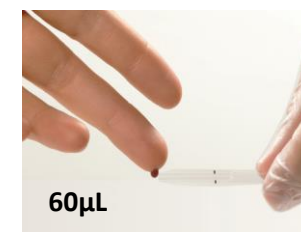

60µL

Recueillir la goutte de sang avec la **pipette TOYO[®]** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir

Phase **2** RÉALISATION DES TESTS

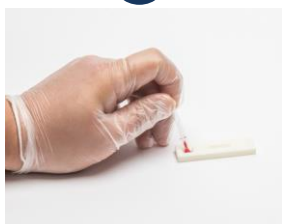

Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt



Délivrer **deux gouttes de diluant** dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



Refermer le flacon 1 et l'homogénéiser par des inversions



Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Homogénéiser par inversion le flacon 2 puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Répéter l'opération précédente pour le flacon 3 et lire le résultat du test **immédiatement**

INTERPRÉTATION



VIH

-



VIH

+



VHC

-



VHC

+

**1 piqûre
2 résultats**