

1



Désinfecter le doigt du patient



Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



Former une grosse goutte de sang suspendue



50µL  
TOYO<sup>®</sup> VHB

Recueillir la goutte de sang avec la pipette TOYO<sup>®</sup> HBsAg tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir (ne pas presser la poire de la pipette)



TOYO<sup>®</sup> VHB

Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes

2



TOYO<sup>®</sup> VHB

Délivrer **une goutte de diluant** dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



50µL  
TOYO<sup>®</sup> VHC

Recueillir la goutte de sang avec la pipette TOYO<sup>®</sup> VHC tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir



TOYO<sup>®</sup> VHC

Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt



Délivrer **deux gouttes de diluant** dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



50µL  
INSTI<sup>®</sup>

Recueillir la goutte de sang avec la pipette INSTI<sup>®</sup> tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir

3



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1



Refermer le flacon 1 et l'homogénéiser par des inversions



Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



**Homogénéiser par inversion le flacon 2** puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Répéter l'opération précédente pour le flacon 3 et lire le résultat du test **immédiatement**

## INTERPRETATION DES TESTS

VIH



VIH

-



VIH

+

VHB



VHB

-



VHB

+

VHC



VHC

-



VHC

+

**1 piqûre  
3 résultats**