

Laboratoires NEPHROTEK
Faire Plus Pour La Santé
43 rue de Bellevue – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél.: 01 46 00 40 40 - Fax: 01 46 00 40 41

www.nephrotek.fr

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude

Bras tendu tout le long du corps (position déclive), main au niveau de la taille

Mode d'emploi

Conseils pour le prélèvement de sang au bout du doigt

Prélèvement



Identifier le test rapide puis désinfecter le doigt (en évitant le pouce et l'index)



Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



Former une grosse goutte de sang suspendue



Recueillir la goutte de sang à l'aide de la pipette

Réalisation du test



Ajouter une goutte de sang en pressant la poire de la pipette dans la zone de dépot S



Délivrer deux gouttes de diluant dans la zone de dépot D



Zone de dépôt du **Sang** Zone de dépôt du **Diluant**

