

TROD* TOYO

Bras tendu tout le long
du corps (position décline),
main au niveau de la taille

HBsAg

Conseils pour le prélèvement de sang
au bout du doigt

Prélèvement facilité
par le lavage préalable
des mains à l'eau chaude

Prélèvement



1 Identifier le test TOYO HBsAg
puis désinfecter le doigt (en
évitant la pince)




2 Piquer le doigt propre avec
l'autopiqueur fourni



3 Former une grosse goutte de
sang suspendue



4 Recueillir la goutte de sang
suspendue en approchant la
pipette horizontalement de la
goutte (ne pas appuyer sur la
poire de la pipette)

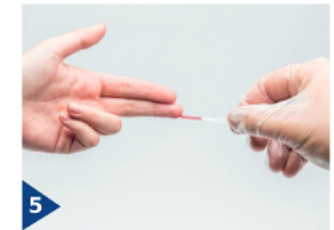

5 Répéter les opérations 3 et
4 jusqu'à ce que le sang ait
atteint le trait noir de la
pipette

Réalisation du test



1 Presser la poire de la pipette
pour vider le sang dans la
zone de dépôt



2 Délivrer une goutte de diluant
dans la zone de dépôt



3 lire après **15 MIN**
(ne pas lire après 20 minutes)



Laboratoires NEPHROTEK
Faire Plus Pour La Santé

43, rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tél. : 01 46 00 40 40 - Fax : 01 46 00 40 41