

Bras tendu le long du corps (position déclinée), main au niveau de la taille

Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage des mains à l'eau chaude



1 Identifier le test INSTITM

Piquer le doigt propre du patient et former une grosse goutte de sang suspendue.



2

Recueillir la première goutte de sang avec la pipette **horizontale** sans presser la poire de la pipette.

• Former une **nouvelle goutte de sang** suspendue et la recueillir en approchant la pipette **horizontalement** de la goutte.

• Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le **trait noir** de la pipette.



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le **flacon 1**.

• Refermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions.



4

Vider le contenu du **flacon 1** dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane.

• **Homogénéiser par inversion le flacon 2** puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane.



• Répéter l'opération précédente pour le **flacon 3** et lire le résultat du test **immédiatement**.

Lecture/Interprétation




Un point

Négatif

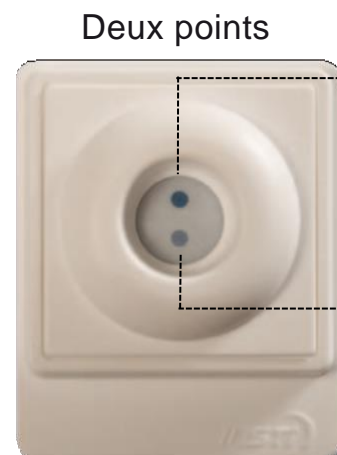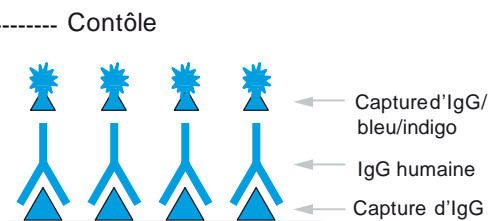


Deux points

Positif

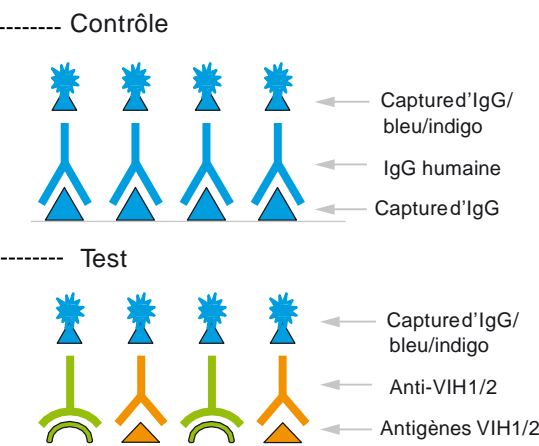


Résultats ininterprétables

INVALIDE

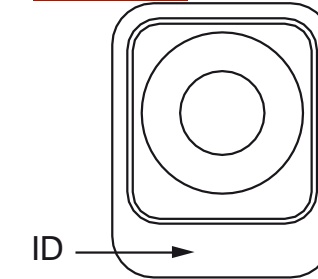

Pas de point Contrôle ni de point Test

INDETERMINE

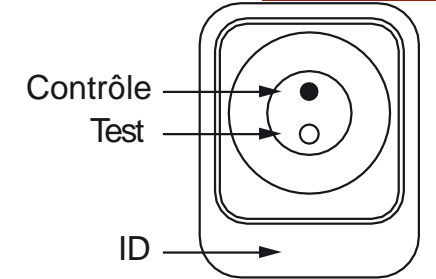

Point Contrôle avec faible anneau dans la zone Test

Recommandation : tout test ininterprétable doit être répété avec un nouvel échantillon sanguin en utilisant un nouveau test INSTI et de nouveaux accessoires.