


Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

Bras tendu le long du corps (position décline), main au niveau de la taille

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude

1 PRÉLÈVEMENT

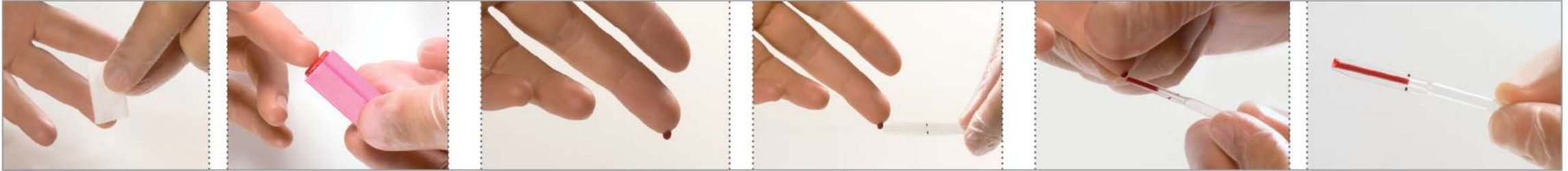

- Identifier le test INSTI™ Multiplex
Désinfecter le doigt (en évitant la pince)
- Piquer le doigt propre du patient
- Former une grosse goutte de sang suspendue
- Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette horizontalement de la goutte
- Former une nouvelle goutte de sang suspendue et la recueillir de la même façon en gardant la pipette à l'horizontale
- Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

2 RÉALISATION DU TEST





- Introduire la pipette au fond du flacon 1
- Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1
- Refermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions
- Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane
- Vider le contenu du flacon 2
- Vider le contenu du flacon 3 et lire le résultat du test immédiatement

Lecture / Interprétation des résultats

4 possibilités

Un point		Deux points		Deux points		Trois points	
VIH	Syphilis	VIH	Syphilis	VIH	Syphilis	VIH	Syphilis
-	-	+	-	-	+	+	+

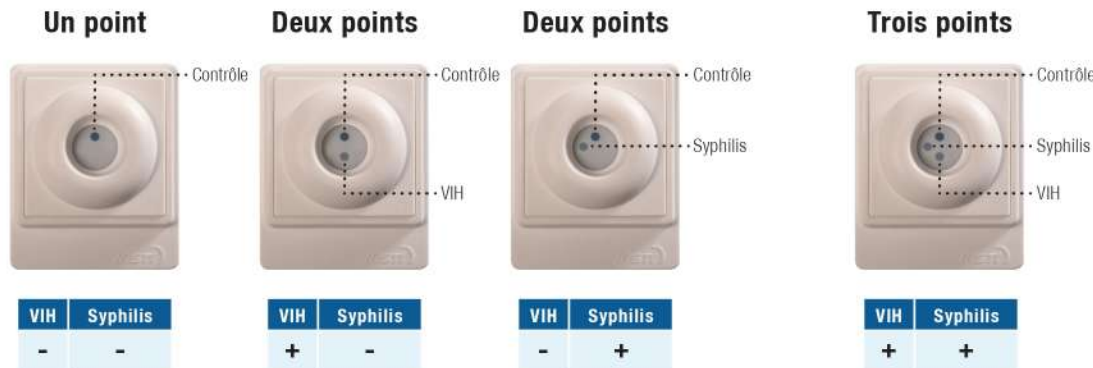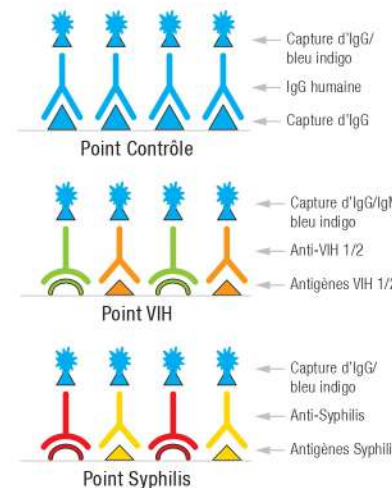
Résultats ininterprétables

INVALIDE

Pas de point Contrôle ni de points Test

INDÉTERMINÉS

Point Contrôle avec faibles anneaux dans les zones Test

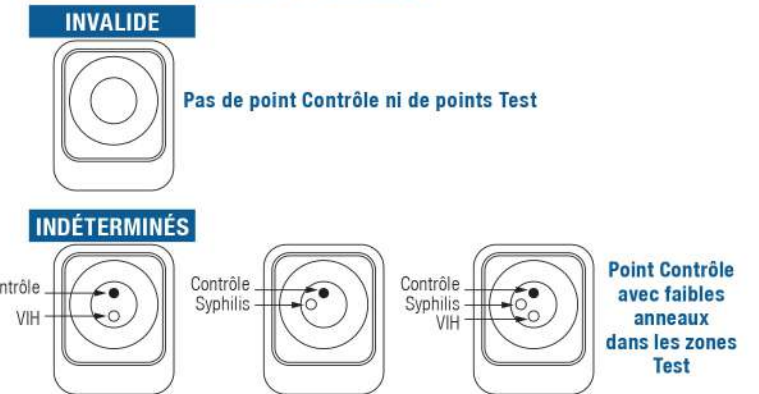

Recommandation : tout test ininterprétable doit être répété avec un nouvel échantillon sanguin en utilisant un nouveau test INSTI™ / INSTI™ Multiplex et de nouveaux accessoires