



Bras tendu tout le long du corps (position décline), main au niveau de la taille

Mode d'emploi

Conseils pour le prélèvement de sang au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude

Prélèvement



1 Identifier le test TOYO® VHC puis désinfecter le doigt (en évitant la pince)



2 Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



3 Former une grosse goutte de sang suspendue




4 Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette horizontalement de la goutte (ne pas appuyer sur la poire de la pipette)



5 Répéter les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

Réalisation du test

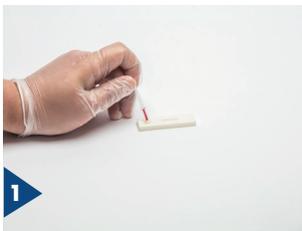

1 Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt




2 Délivrer deux gouttes de diluant dans la zone de dépôt



3 lire après **15 MIN** (ne pas lire après 20 minutes)

Interprétation des résultats

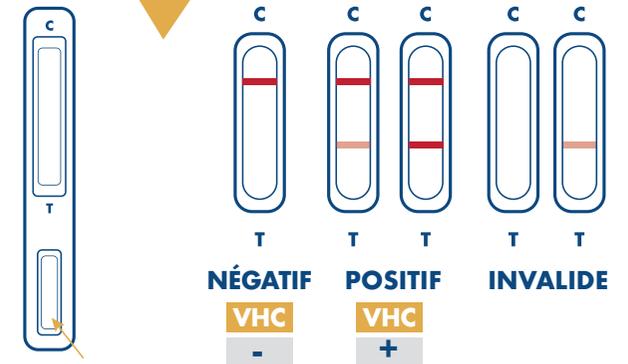

zone de dépôt