

# TROD\* TOYO

Bras tendu tout le long du corps (position décline), main au niveau de la taille

## HBsAg

Conseils pour le prélèvement de sang au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude


### Prélèvement



1 Identifier le test TOYO HBsAG puis désinfecter le doigt (en évitant la pince)



2 Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni

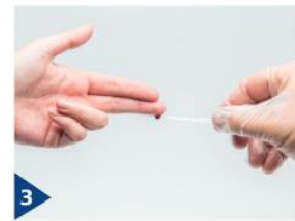

3 Former une grosse goutte de sang suspendue



4 Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette horizontalement de la goutte (ne pas appuyer sur la poire de la pipette)



5 Répéter les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

### Réalisation du test



1 Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt



2 Délivrer une goutte de diluant dans la zone de dépôt




3

Lire après **15 MIN**  
(ne pas lire après 20 minutes)

### Interprétation des résultats



zone de dépôt

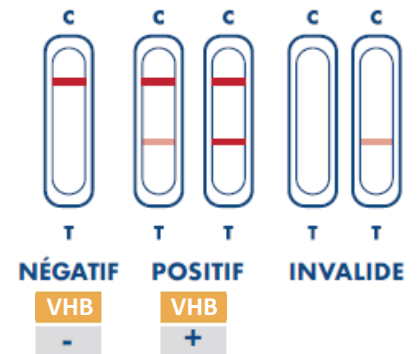

\*TROD : Test Rapide d'Orientation Diagnostique utilisable selon la réglementation en vigueur THB-Brochure v4 (27/04/2022)