


1



Désinfecter le doigt du patient

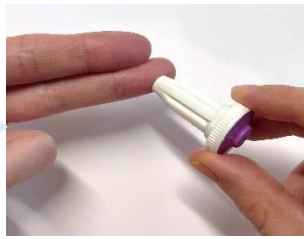

Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



Former une grosse goutte de sang suspendue



Recueillir la goutte de sang avec la **pipette INSTI® Multiplex** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir (**ne pas presser la poire de la pipette**)



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1

2



Recueillir la goutte de sang avec la **pipette TOYO® HBsAg** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



Délivrer **une goutte de diluant** dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



Recueillir la goutte de sang avec la **pipette TOYO® VHC** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt

3



Délivrer **deux gouttes de diluant** dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



Refermer le flacon 1 et l'homogénéiser par des inversions



Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Homogénéiser par inversion le flacon 2 puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Répéter l'opération précédente pour le flacon 3 et lire le résultat du test **immédiatement**

INTERPRETATION DES TESTS

VIH /syphilis



VIH	Syphilis
-	-



VIH	Syphilis
+	-



VIH	Syphilis
-	+



VIH	Syphilis
+	+

**1 piquê
4 résultats**

VHB



VHB
-



VHB
+

VHC



VHC
-



VHC
+